

DiaMan® Pulsera Bluetooth



Contenido

- Pulsera Bluetooth
- Manual de Usuario
- Cable USB para carga magnética

1. Descargue la App

- ▶ Descargue e instale la App DiaManBGM disponible en PlayStore y App Store.
- ▶ En la App DiaManBGM seleccione el cuadro de actividad física o seleccione el símbolo de agregar abajo.
- ▶ Seleccione Nuevo Registro y después Usar Bluetooth.
- ▶ Siga las instrucciones en pantalla para conectar la pulsera.
- ▶ Presione Sincronizar Datos y después Continuar.
- ▶ En caso de que no se haya establecido la fecha, en éste paso puede establecerse.
- ▶ Listo! su Pulsera Bluetooth DiaMan está emparejada y lista para transmitir su información.

Conexión con la App DiaManBGM



▶ Si requiere llevar el control de todos los marcadores de la pulsera, puede visualizarlos por medio de la App JClife disponible en PlayStore y App Store. También es una App útil para establecer fecha y hora si se le complica con la App DiaManBGM



2. Active la Pulsera

Conecte el cargador de batería y conecte la Pulsera para activar. Al conectar, la barra de progreso cambiará de vacío a lleno para indicar que su Pulsera está activa. Después de activarla, la Pulsera empezará a cargar la batería.



3. Carga de Batería

La Pulsera despliega el indicador de batería en la pantalla principal.

Cuando se esté en Modo Pulso, si la batería tiene menos del 40%, se cancelará el Modo Pulso y se mostrará un ícono de batería baja como se muestra en la imagen para recordarle que recargue la batería.



Se puede seguir usando la Pulsera en Modo Activo aún cuando la función de Modo Pulso esté cerrada.

En Modo Activo, cuando la batería sea menor al 10%, todas las funciones se cerrarán y sólo se mostrará un ícono de batería baja como se muestra a continuación para recordarle que recargue la batería.



4. Modo Activo

Toque la pantalla para cambiar la función desplegada.



5. Modo Pulso

Presione la pantalla por 3 segundos en la pantalla de medición de pulso para entrar al Modo Pulso, el ícono del medición de pulso cambiará de de vacío a lleno y después mostrará un valor del pulso.

Presione nuevamente la pantalla por 3 segundos para salir a la pantalla principal.

Nota: Sólo se puede acceder al Modo Pulso desde la pantalla de medición de pulso.



Basado en los diferentes rangos de pulso, la pantalla podrá mostrar 5 opciones de entrenamiento detectados como Fat Burn (Quema de Calorías), Aerobic, Steady (Quieto), Anaerobic o Maximal (Máximo) para de acuerdo a lo presentado, pueda controlar la intensidad de su ejercicio. Cuando el valor del pulso sea demasiado alto, la pulsera vibrará un poco para recordarle que debe bajar la intensidad de su ejercicio.



Por favor use la pulsera ajustadamente para mediciones de pulso precisas. En caso de que la Pulsera no esté ajustada apropiadamente, la misma de recordará su ajuste por medio de una vibración.



6. Notificaciones

La pulsera vibra cuando recibe en su teléfono inteligente una llamada, mensajes de SMS, Whatsapp, Twitter, Facebook, WeChat, etc.

¡Manténgase activo, Manténgase motivado!

Monitor de actividad con pantalla a color, carga de batería magnética y conexión Bluetooth

¡Conéctate con la vida, Conéctate con DiaMan!

- Monitoréate
- Sincroniza
- Comparte

Conexión con la App DiaManBGM



www.diaman.net

Cuidados y Mantenimiento

Cuidados y Mantenimiento

Limpie la superficie de la Pulsera Bluetooth DiaMan con un trapo húmedo.

No utilice detergente o solventes para limpiar la Pulsera Bluetooth DiaMan.

La Pulsera Bluetooth DiaMan no se recomienda para:

- ▶ Menores de edad
- ▶ Mujeres embarazadas
- ▶ Pacientes con marcapasos o cualquier otro aparato médico interno.

Soporte y Dudas

Soporte y Dudas:

Resolución de preguntas frecuentes, manuales y videos ilustrativos: <https://www.diaman.net/faq/>
Para hacer efectiva la garantía, envíe un correo a: contacto@diaman.net o visite nuestra página de internet www.diaman.net para encontrar opciones de contacto con nosotros.



Especificaciones

Tamaño: Cuerpo Principal: 43.2x20x11.3mm

Correa: 240x19mm

Peso: 22.6 g

Batería: Li-ion 3,7Vcc 105mAh +0.388Wh recargable

Pantalla: 0.96TFT

Memoria Interna Max.: 30 días

Distancia Caminando: Max 999.99km

Calorías: Max 9999.9kcal

Registro de Tiempo de Actividad Max: 99h59min

Bluetooth 4.0



NYC-CT305520C1

Hecho en China

Importado y distribuido por:
DiaMan Medical SA de CV
Azteca Norte 4426, 2A
Santiago Momoxpan
San Pedro Cholula, Puebla
C.P. 72760
www.diaman.net



DiaMan®
we care

www.diaman.net