

## Lanceteador Inserto

REF DMLD01


Español

### PRINCIPIO E INTENCIÓN DE USO

El Lanceteador DiaMan™ se utiliza con las lancetas estériles DiaMan™ o cualquier otra lanceta estéril desechable compatible para extraer sangre capilar de la punta de los dedos, palma de la mano (en la base del pulgar) o el antebrazo, para pruebas de glucosa en sangre o alguna otra prueba utilizando pequeñas cantidades de sangre.

### INSTRUCCIONES DE USO

Previo a la prueba, elija una superficie limpia y seca. Relacionéese con el procedimiento y asegúrese de tener a la mano todos los aditamentos para obtener una gota de sangre.

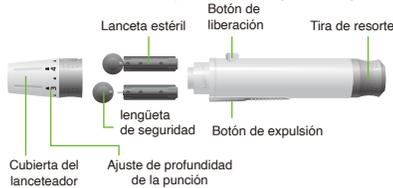


**Importante:** Antes de comenzar la prueba, pase un algodón o un hisopo mojado en alcohol o en agua jabonosa por la zona donde vaya a realizarla. Si fuera necesario, utilice agua templada para aumentar el flujo sanguíneo. Después, séquese bien las manos, así como la zona donde vaya a tomar la muestra.

### PRUEBA EN LA PUNTA DE LOS DEDOS

Para pruebas en la punta de los dedos, ajuste la profundidad de la penetración para reducir la incomodidad. No es necesaria la tapa transparente para muestras de la punta de los dedos.

- Desenrosque la cubierta del lanceteador de su estructura principal. Inserte una lanceta estéril en el lanceteador y empujela hasta que la lanceta llegue a un punto en el dispositivo en el que no pueda seguir avanzando.
- Mantenga la lanceta con firmeza en el lanceteador y gire la lengüeta de seguridad de la lanceta hasta que se afloje, tras lo cual tire de la lengüeta de seguridad para sacarla de la lanceta. Guarde la lengüeta de seguridad para eliminar la lanceta utilizada.
- Enrosque cuidadosamente la cubierta en el lanceteador. Evite contacto con la aguja expuesta. Asegure que la cubierta está sellada en el lanceteador.
- Ajuste la profundidad de punción girando la cubierta del lanceteador. Se pueden configurar 5 profundidades de punción. Para reducir la incomodidad, use la configuración más baja que produzca una adecuada gota de sangre.

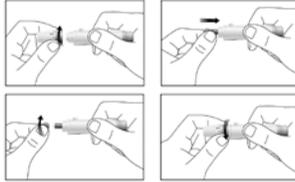

- Ajustes:
- 1 y 2 para piel delicada
  - 3 para piel normal
  - 4 y 5 para piel callosa o gruesa

**Nota:** Mayor presión del dispositivo de lanceta contra el dedo también incrementa la profundidad de punción.


- Tire del protector hacia atrás para fijar el lanceteador. Escuchará un click cuando el botón de liberación cambie a color naranja para indicar que el lanceteador está cargado y listo para obtener una gota de sangre.
- Antes de comenzar la prueba, pase un algodón o un hisopo mojado en alcohol o en agua jabonosa por la zona donde vaya a realizarla. Si fuera necesario, utilice agua templada para aumentar el flujo sanguíneo. Después, séquese bien las manos, así como la zona donde vaya a tomar la muestra. Masajea la mano de la muñeca hacia arriba un par de veces para incrementar el flujo sanguíneo.



- Apriete el lanceteador contra el lateral del dedo en el que vaya a pincharse haciendo que la cubierta descansa sobre el dedo. Empuje el botón de liberación para realizar el pinchazo en la punta del dedo. Deberá escuchar un click cuando se active el dispositivo. Masajea suavemente de la base a la punta del dedo para obtener la gota de sangre requerida. Evite embarrar la gota de sangre.



**Nota:** Para reducir el dolor pínchese en los laterales de las puntas de los dedos. Se recomienda pinchar alternadamente en los lados de los dedos. Pinchar en el mismo lugar repetidamente puede provocar inflamaciones o callosidad en las puntas de los dedos.

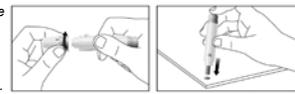

- Desenrosque la tapa del lanceteador. Coloque la lengüeta de la lanceta en una superficie dura e insértese cuidadosamente la aguja en la lengüeta.
- Presione el botón de liberación para asegurar que la lanceta está en posición extendida. Deslice el botón de liberación hacia adelante para descartar la lanceta utilizada en un contenedor de desechos filosos. Coloque la cubierta en el lanceteador.

**Advertencia:** El lanceteador DiaMan™ está diseñado para auto-prueba en un mismo paciente. No debe de ser utilizado en más de una persona debido al riesgo de infección.

Cada vez que se haga una prueba, utilice una lanceta DiaMan™ nueva ya que después de un uso deja de ser estéril. Siempre descarte las lancetas de manera adecuada para prevenir lesiones o contaminación a otras personas.



### MUESTREO EN EL ANTEBRAZO O LA PALMA DE LA MANO (EN LA BASE DEL PULGAR)

El antebrazo y el área de la palma de la mano tienen menos terminales nerviosas que la punta de los dedos. Podrá notar que obtener sangre de estos sitios es menos doloroso que de la punta de los dedos. El procedimiento para el muestreo en el antebrazo y la palma de la mano es diferente. Siga los pasos 1 y 2 para insertar la lanceta y cargar el lanceteador.

- Enrosque la tapa en el lanceteador.

- Elija un sitio para pincharse ya sea el antebrazo o la palma de la mano.

Seleccione un área suave y carnosa en el antebrazo o la palma de la mano que esté limpio y seco, alejado de hueso y libre de venas o vellos visibles.



**Nota:** Para traer sangre fresca a la superficie del sitio de punción, masajee el sitio de punción vigorosamente por algunos segundos hasta que se sienta tibio.

- Coloque el lanceteador contra el sitio de punción. Presione y sostenga la tapa contra el sitio de punción por un par de segundos. Presione el botón de liberación del lanceteador, pero no levante inmediatamente el lanceteador del sitio de punción.

Mantenga el lanceteador contra el sitio de punción hasta que pueda corroborar que existe suficiente sangre para la prueba.

### CUIDADOS DEL LANCETEADOR

Limpie el lanceteador usando un paño suave con agua jabonosa tibia según se requiera. Utilice alcohol isopropílico al 70% para desinfectar el lanceteador. Seque cuidadosamente el lanceteador. No sumerja el dispositivo de lanceta en ningún líquido.

### PRECAUCIONES

- No utilice la lanceta si no tiene la lengüeta de seguridad o dicha lengüeta está floja cuando se saque la lanceta de la bolsa.
- No utilice la lanceta si la aguja está doblada.
- Tomese sus precauciones cuando la aguja de la lanceta esté expuesta.
- Nunca comparta lancetas o lanceteadores con otras personas.
- Para reducir riesgos de infección por uso en mediciones previas. Use siempre una lanceta estéril nueva. No reutilice las lancetas.
- Evite ensuciar el lanceteador o las lancetas con loción de manos.

### GARANTÍA LIMITADA

Si el lanceteador no funciona por alguna razón diferente al uso normal en los primeros 5 años después de la compra, lo reemplazaremos con un lanceteador nuevo o equivalente sin cargo. Favor de contactar a su distribuidor local para el cambio.

### ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	Consulte las Instrucciones de uso		Número de Lote		Número de Catálogo
		Representante autorizado			Fabricante



**Fabricado por:**  
Tianjin Huahong Technology Co., Ltd  
A01, PlantB, No. 278, Hangkong Road,  
Tianjin Pilot Free Trade Zone (Air Port  
Industrial Park) 300308 Tianjin, China



Shanghai International Holding  
Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg, Germany  
Email: shholding@hotmail.com

**Importado y distribuido por:**  
DiaMan Medical S.A. de C.V.  
DME180827FH8  
Azteca Norte 4426, 2A  
Santiago Momoxpan  
San Pedro Cholula, Puebla  
C.P. 72760  
www.diaman.net

Cofepris Reg No:  
Lanceteador 0901E2020 SSA  
Lancetas 0941E2020 SSA

Número:  
Fecha de entrada en vigor: 21/03/2025